



Aizoi®

CARDIOPAD LITE GUIDA AL PRIMO UTILIZZO

PRIMO ACCESSO*

1. Avviare CardioPadLite App
(se non presente nel Tablet installarla scansionando il QR Code a lato)
2. Inserire le credenziali temporanee fornite nell'email "Abilitazione operatore"
3. Premere "Accedi" e attendere che l'autenticazione avvenga con successo
4. In caso di esito positivo verrà mostrato un PIN numerico di 4 cifre
5. Prendere nota del PIN e conservarlo per i futuri accessi

* Per questa operazione è necessaria la connessione a internet




SCANSIONAMI

Inquadrare l'immagine per installare l'app sul tablet

ACCESSI SUCCESSIVI

1. Avviare CardioPadLite App
2. Selezionare il proprio utente dalla lista
3. Inserire il PIN utilizzando il tastierino numerico

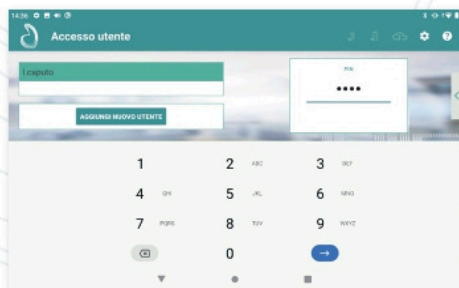

MANUALE D'USO

Il manuale d'uso viene fornito in formato digitale PDF. Per la consultazione è necessario disporre di un qualsiasi dispositivo elettronico che legga e visualizzi il formato PDF.

È sempre possibile richiedere una copia cartacea del manuale utente senza costi aggiuntivi inviando una mail a info@aizoi.com; la copia cartacea viene fornita entro massimo 7 giorni dalla richiesta.



SCANSIONAMI

Inquadrare l'immagine per ottenere il manuale d'uso

Aizoi S.r.l.


Via Cardinal Massaia, 83 - 10147 Torino - Italia
www.aizoi.com | info@aizoi.com
UDI-DI di Base: ++G419CARDIOPAD9U

rev. 4
30-12-2025

ESECUZIONE ESAME

01. DATI PAZIENTE

1. Premere sull'icona della fotocamera



14:40 Dati paziente

01 DATI PAZIENTE 02 POSIZIONAMENTO ELETTRODI 03 REGISTRAZIONE ECG 04 QUESTIONARIO

Per l'autocompletazione è possibile fotografare il codice a barre sul retro del tessarino sanitario

Codice fiscale

Data di nascita Sesso

Nome Cognome

Città di nascita Stato di nascita

Email Telefono

Gruppo etnico



2. Scansionare il retro della Tessera Sanitaria o della Carta d'Identità Elettronica per inserire i dati del paziente
3. Premere "Salva e vai a posizionamento elettrodi"

02. POSIZIONAMENTO ELETTRODI

1. Posizionare gli elettrodi secondo le indicazioni presenti sul display del dispositivo
2. Per le prime applicazioni si consiglia di utilizzare la guida, è sufficiente selezionare "Guidami al posizionamento degli elettrodi"
3. Una volta applicati gli elettrodi premere "Vai a registrazione ECG"

03. REGISTRAZIONE ECG

1. Il tracciato è subito visibile, per avviare la registrazione che verrà inviata premere "REGISTRA ECG" e attendere che termini il conto alla rovescia
2. Premere "Salva e vai questionario"

04. QUESTIONARIO

1. Compilare opportunamente il questionario saltando eventuali domande di cui la risposta non è nota
2. Premere "Salva e invia esame"
3. L'esame sarà inviato non appena il dispositivo sarà connesso alla rete
4. Il referto sarà disponibile, secondo la tempistica desiderata, direttamente sul Tablet o sul Portale Aizoi